



## Anleitung zum Zusammenbau des Gesichtsvisiers

Das Gesichtsvisier bietet Schutz gegen Tröpfchen und sollte idealerweise kombiniert mit einer Schutzmaske getragen werden.

### **Erstaufbau:**

Die Löcher in der mitgelieferten Folie einfach der Reihe nach in die Befestigungsstifte der Gesichtshalterung drücken.

Bitte prüfen Sie anschließend den festen Halt der Folie.





## Austauschen der Folie:

Falls die Folie ausgetauscht werden muss, sollte diese von der Gesichtshalterung entfernt werden. Als Ersatzfolie können Sie jede andere Folie verwenden. Die Löcher werden mit einem **handelsüblichen Locher**, eingestellt auf DIN A 6, vorgenommen.

